

QUICKVUE[®]

RSV TEST
Respiratory Syncytial Virus

NASOPHARYNGEAL SWAB PROCEDURE (See reverse for Nasal Wash / Nasopharyngeal Aspirate)

NASENRACHENRAUMABSTRICH (Anleitung zur Gewinnung der Nasenspülflüssigkeit/des Nasenrachenaspirates finden Sie auf der Rückseite)

PROCEDURA CON TAMPONE RINOFARINGEO (Vedere a tergo per il lavaggio nasale / aspirato rinofaringeo)

PROCÉDURE POUR ÉCOUVILLONNAGE RHINOPHARYNGÉ (Voir au verso pour le lavage nasal / l'aspiration rhinopharyngée)

PROCEDIMIENTO CON TORUNDA NASOFARÍNGEA (véase al reverso el procedimiento de lavado nasal/aspiración nasofaríngea)


PROCEDIMENTO COM SWAB NASOFARÍNGEO (Consulte o verso para obter informações sobre o Lavado Nasal / Aspirado Nasofaríngeo)

1



Fill to Line
Bis zur Linie füllen
Riempire fino al segno
Remplir jusqu'à la ligne
Llene hasta la línea
Encha até a linha

2

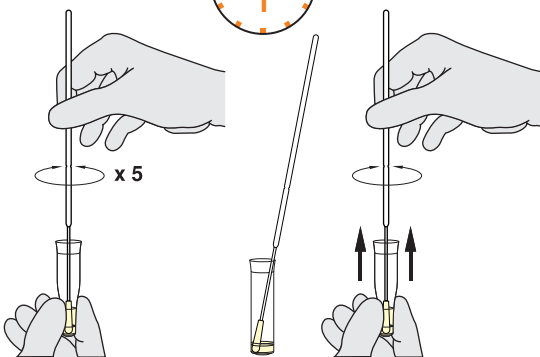

3



Consult Instructions for Use
Gebrauchsanweisung beachten
Consultare le istruzioni per l'uso
Consulter la notice d'emploi
Consulte las instrucciones de uso
Consulte as instruções de utilização



Quidel Corporation
San Diego, CA 92121 USA

QUIDEL[®]

1119200 (06/06)

QUICKVUE[®]

RSV TEST
Respiratory Syncytial Virus

NASAL WASH / NASOPHARYNGEAL ASPIRATE PROCEDURE (See reverse for Nasopharyngeal Swab)

GEWINNUNG DER NASENSPÜLFÜSSIGKEIT / DES NASENRACHENASPIRATES (Anleitungen für Nasenrachenaspirates finden Sie auf der Rückseite)

PROCEDURA DI LAVAGGIO NASALE / ASPIRATO RINOFARINGEO (Vedere a tergo per il tampone rinofaringeo)

PROCÉDURE DE LAVAGE NASAL / ASPIRATION RHINOPHARYNGÉE (Voir au verso pour l'écouvillonnage rhinopharyngée)

PROCEDIMIENTO DE LAVADO NASAL/ASPIRACIÓN NASOFARÍNGEA (véase al reverso el procedimiento con torunda nasofaríngea)


PROCEDIMENTO DE LAVADO NASAL / ASPIRADO NASOFARÍNGEO (Consulte o verso para obter informações sobre o Swab Nasofaríngeo)

1




Fill to Line
Bis zur Linie füllen
Riempire fino al segno
Remplir jusqu'à la ligne
Llene hasta la línea
Encha até a linha

2

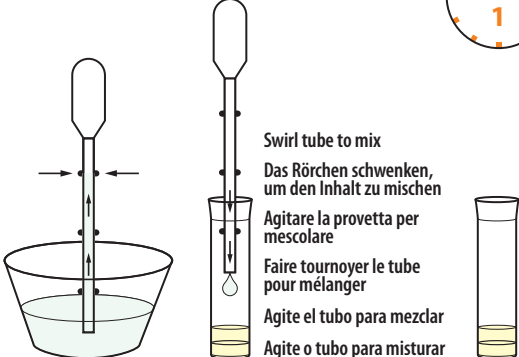

Swirl tube to mix
Das Rörchen schwenken,
um den Inhalt zu mischen
Agitare la provetta per
mescolare
Faire tourner le tube
pour mélanger
Agite el tubo para mezclar
Agite o tubo para misturar

3

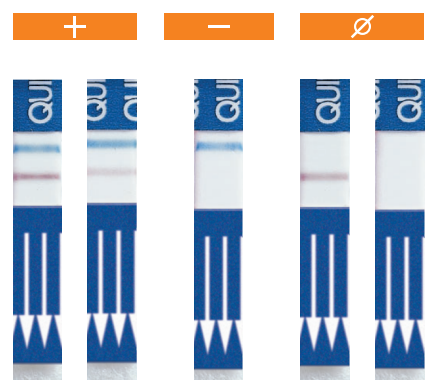

Consult Instructions for Use
Gebrauchsanweisung beachten
Consultare le istruzioni per l'uso
Consulter la notice d'emploi
Consulte las instrucciones de uso
Consulte as instruções de utilização