



# 4 wichtige Punkte zum Download der Zielwertzettel SimplexTAS<sup>TM</sup>10<sup>°</sup>



## Punkt 1: Website aufrufen

Zum Abrufen der Testchargen-spezifischen Zielwertzettel Ihres SimplexTAS<sup>™</sup> 101 Tests gehen Sie bitte auf die folgende Tascom Website unter: www.tascom.org



# Punkt 2: Zur Übersicht gelangen

Klicken Sie auf der Startseite auf den Menüpunkt **"Control Solution Info"** um auf die Übersicht aller Parameter von Tascom zu gelangen. Scrollen Sie ggf. ein Stück nach unten.

-	10	totar bea	
15	alter a specification and the	Apartment Million and	
114	NUMBER OF STREET	Approximate and a second	
10	HUMPED AND STREET	Administrative (0012141)	
10	NUMBER OF STREET, STRE	Approximate Displaying	
10	001.042107401.0440004000	date-ratestar 10070414	
	onument of the second second	Administration Internation	
10	00.000000000000000000000000000000000000	Apportations 2017-04-08 11-0714	
128	CARDENIA SOCIETINE	NEWSRAW DESIGN	
107	contraction contraction (	Approximate Approx	
104	X0,000111,0000X10411	Aphrobacian USED An An	
10	ACCESSED AND ADDRESS OF ADDRESS O	Appropriate Approximate	

### Punkt 3: Parameter wählen

Wählen Sie Ihren gewünschten Parameter und die entsprechende Testcharge mit einem Klick aus.

	10, JULE 101 (0, CHA 00 011 010	
kgh -	Administration	
458.000	00.000 MB4 10	
Carneys 1		
Carriege La	0.02108	
Cartrepa Co	ski laanar i tanar	
	an Systechard-Analyse Chamilely Earthal	
Cort of Lat	8790	
Control Lat	879	
Control Lat	876	
Contraction Barrier S	4 10, 012 10, 007, 0010 M	
EAS?	ann 6 11, ann an Jong, anns ad	
Curra LA 3423 44	#10.011/00.0072.0110.48	

#### Punkt 4: Zielwertzettel downloaden

Auf der nun geöffneten Seite wird Ihnen die jeweils verwendete QK Charge angezeigt.

Ihnen steht zusätzlich auf der Seite ein PDF-Link mit den Zielwerten / Chargeninformationen als Download zur Verfügung. Klicken Sie dafür auf den Link und speichern Sie sich diese Datei ab.

Prüfen Sie zur Sicherheit die korrekte Zuordnung der QK zu der Testcharge.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren betreuenden Außendienst oder die Hotline von Hitado unter 02924 9705-88.

Vertrieb Deutschland: Sysmex Deutschland GmbH Bornbarch 1, 22848 Norderstedt · Telefon +49 (40) 534 10 2-0 · Fax +49 (40) 523 23 02 · info@sysmex.de · www.sysmex.de Vertrieb Deutschland: Hitado GmbH Dreihausen 2, 59519 Möhnesee, Deutschland · Telefon +49 2924 9705-0 · Fax +49 2924 9705-31 · info@hitado.de · www.hitado.de Vertrieb Österreich: Sysmex Austria GmbH Lienfeldergasse 31-33, 1160 Wien, Österreich · Telefon +43 1 4861631 · Fax +43 1 486163125 · office@sysmex.at · www.sysmex.at Hersteller: Tascom Co., LTD. 824, Anyang Megavalley, 268 · Hagui-ro, Dongan-gu, Anyang-si · Gyeonggi-do, 14056 Korea · www.tascom.org