

4 wichtige Punkte bei der Systemvorbereitung

Super ID™



Punkt 1: Containerkit befestigen

Hängen Sie das Containerkit an der Rückseite des Systems ein. Führen Sie dann die Schläuche in die Behälter und befestigen Sie die Schraubverschlüsse.



Punkt 2: Netzteil anschließen

Schließen Sie das Netzteil des Systems an und verbinden Sie optional Ihr Druckerkabel mit dem Super ID™.



Punkt 3: Gerät einschalten

Schalten Sie den Drucker und das Gerät ein. Warten Sie vor der Nutzung die Aufwärmphase von bis zu 15 Minuten ab. Danach ist das Gerät betriebsbereit.



Punkt 4: ParamCard auslesen

Schieben Sie, vor der Messung die ParamCard ein, damit das Gerät erkennt, mit welcher Chargennummer Sie arbeiten. Lassen Sie die Methode über die Karte auslesen und nehmen Sie die ParamCard wieder heraus.

Lesen Sie bei der Verwendung einer neuen Reagenz-Charge, immer die beigelegte ParamCard ein. Diese befindet sich in der HbA1c-Reagenzverpackung.