

9 wichtige Punkte bei der EQK-Messung

Cascade Abrazo™



Punkt 1:

Nach Aktivierung des Systems wird auf dem Bildschirm das Hauptmenü angezeigt. Das Gerätesystem ist betriebsbereit.



Punkt 2:

Drücken Sie im Bildschirm die Schaltfläche QK-Test.



Punkt 3:

Anschließend wählen Sie den EQK Button auf dem Display.



Punkt 4:

Das Gerät fordert Sie auf, die entsprechende Testkarte zu scannen.



Punkt 5:

Scannen Sie die Testkarte. Dazu die Karte in 15-20 cm Abstand leicht schräg in den Lichtstrahl des Scanners halten.



Punkt 6:

Führen Sie die Karte unter den Führungsschienen rechts und links bis zum Widerstand in das Gerät ein.



Punkt 7:

Die Messzeit beträgt ca. 5 Min. Es werden dabei 3 Messzeitpunkte durchlaufen (30, 90 und 270 Sek.).



Punkt 8:

Nehmen Sie das Ergebnis an, indem Sie die Schaltfläche „Ergebnisse übernehmen“ wählen.



Punkt 9:

Entnehmen Sie die Karte und führen Sie diese zurück in die weiße Aufbewahrungshülle.

Die Karte sollte nicht in der Nähe von starken elektromagnetischen Feldern gelagert werden.