

# Anwenderinformation zur Durchführung des Hitadokkult Stuhltests



Packen Sie das 3-teilige Patientenset aus.



Beschriften Sie die Entnahmeset-Hülle mit Ihrem Namen und Ihrem Geburtsdatum. Schreiben Sie Ihren Namen auch auf das Röhrchen.



Befestigen Sie den Stuhlfänger entsprechend der aufgedruckten Anleitung an den äußeren Seiten der Toilettenbrille.


Patientenseite



Arztseite (nicht öffnen!)



Schrauben Sie das Probenröhrchen an der geriffelten Seite auf. Halten Sie dabei unbedingt das Probenröhrchen senkrecht, damit die darin enthaltene Pufferlösung nicht ausläuft.

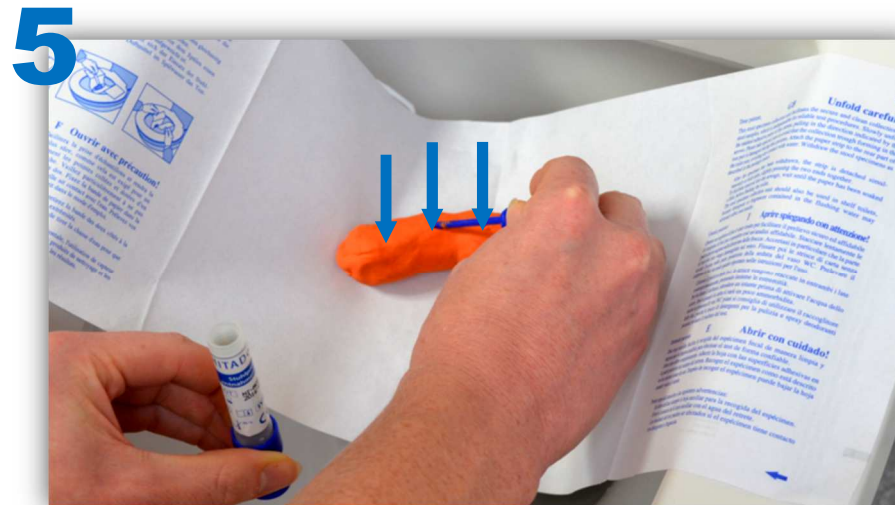

Stechen Sie den Spiralstab an drei verschiedenen Stellen in den Stuhl. Die Menge, welche in der Spirale hängen bleibt, ist völlig ausreichend. Führen Sie danach den Spiralstab in das Probenröhrchen zurück und schrauben Sie den Verschluss wieder fest zu.



Schütteln Sie das Probenröhrchen für ca. 5 Sekunden und stecken Sie es in die beschriftete Entnahmeset-Hülle zurück.